

Tilbud Personheis 70 % Rabatt

Type Sololift - Rifton

Ronda AS har tidligere vært importør av Rifton produkter. Ettersom Ronda nå forhandler andre produkter ønsker vi å selge ut våre demo Rifton produkter. Dette er kvalitetsprodukter som vi selger ut til sterkt reduserte priser.

Rifton Solo lift.

Leveres med 3 størrelser løfte vest. Kan løfte personer fra gulv, stol eller seng til stående eller sittende posisjon.

Se INFORMASJON

Utstyr – komplett:

inkludert small, medium og large vest, samt lårstropper. (Alt komplett)



Dimensjon:

Lengde:	122 cm
Bredde:	79-132 cm
Høyde:	99-132 cm
Høyde base:	15 cm
Vekt:	64 kg
Vekt Solo-Vest:	2,3 kg
Solo Vest liten brukers omkrets:	56-86 cm
Solo Vest med. Brukers omkrets:	71-102 cm
Solo Vest stor brukers omkrets:	91-132 cm
Maks brukevekt:	160 kg
Maks bruker høyde:	193 cm

Pris ekskl. mva	Veil. Pris
Solo Lift	Kr 48.135,-
Solo vest liten	Kr 5.100,-
Solo vest medium	Kr 5.100,-
Solo vest stor	Kr 5.100,-
Sum veill. ekskl mva	Kr 64.435,-

Selges
For
Kr. 18.000,-
ekskl mva

Vi har kun 1 stk på lager. "Første mann til mølla"

Mvh
Trygvald Thorsen
Ronda AS

RIFTON

Solo Lift

TILBUD



Personløfter med to funksjoner, forflytte sittende, løfte fra sittende til opp og stå, dreie 180 grader rundt og føre personen inn i f.eks. gåstativ/gåstol.



Fjernkontroll med kabel



Pedal for utvidelse av base



Batteri



Ved å bruke blå hendel kan en dreie/snu en person 180 grader rundt når en står



Løfter fra sittende til stående, personen har da Solo Liften foran seg.



Person er dreid rundt 180 grader og ført inn i gåstativ, da får personen Solo Liften bak



Passiv løft



Solo Vest liten / Brukers omkrets 56-86 cm



Solo Vest medium / Brukers omkrets 71-102 cm



Solo Vest stor Brukers omkrets 91-132 cm



Bakre del – krok for oppheng



Solo Vest lukkes i front med to klikkspenner– svært sikker



Solo Liftens arm løftes opp og føres ned bak personen



Krokene på vesten klikkes fast til armen



Solo Lift gjør det mulig å løfte en person sittende på gulv til opp å stå



Etter oppreist stilling dreier personen 180 grader rundt, føres trygt ned i stol.



Solo Vesten kan også benyttes til takheis

